



Doppelschienen-Kurventreppenlifte

Handicare 2000 | 2000 Simplicity



Die Vorteile eines Handicare 2000

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Treppensteigen haben, sind Sie nicht allein. Jedes Jahr sind tausende Menschen in Deutschland auf der Suche nach einer guten Lösung – einem Treppenlift!

Durch den Einbau eines Treppenliftes müssen Sie sich keine Gedanken mehr über einen Auszug aus dem eigenen Haus machen und Sie wohnen wieder selbstbestimmt und ohne Angst vor der Treppe weiter in der gewohnten Umgebung. Als einer der weltweit führenden Hersteller für Treppenlifte hat Handicare bereits tausenden Menschen geholfen, Ihre Probleme beim Treppensteigen zu beseitigen.

Wenn Sie einen Treppenlift benötigen, der auch Kurven meistert und auf Wendeltreppen installiert werden kann, bietet Ihnen der Handicare 2000 eine sichere und zuverlässige Lösung. Der Handicare 2000 Treppenlift passt auf fast alle Treppen im Innen- sowie Außenbereich Ihres Hauses und bietet Ihnen alles was Sie von einem Treppenlift erwarten können. Als optionales Zubehör können Sie sich noch für eine elektrische Drehfunktion Ihres Sitzes oder ein automatisches Hochklappen Ihrer Fußplatte entscheiden.



Maßarbeit für jede Situation

Perfekte Verarbeitung, 100% Maßarbeit... und doch kann der Handicare 2000 sehr schnell bei Ihnen zu Hause eingebaut werden. Bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch, geht unser Fachhändler alle technischen Möglichkeiten zur Realisierung mit Ihnen durch.



Jeder Handicare Treppenlift wird exakt passend für Ihren Treppenverlauf gefertigt. Um sicherzustellen, dass jedes Detail passt, benutzen wir modernste photometrische Messtechnologie, welche ein exaktes Messen und die optimale Anpassung an Ihre Situation ermöglicht.

Der Handicare 2000 kann mit zwei unterschiedlichen Stuhltypen ausgestattet werden. Unser Fachhändler wird Ihnen gerne bei der Auswahl des für Sie passenden Stuhls behilflich sein.



Smart-Sitz



Simplicity-Sitz



Sitzmerkmale



Fernbedienung

Der Handicare 2000 wird immer mit zwei Fernbedienungen ausgeliefert. Damit können Sie Ihren Treppenlift jederzeit heranzurufen oder auf eine Ladestation senden.



Sicherheit als Standard

Ihre Handicare 2000 Treppenlift ist mit einer Reihe von Sicherheitssensoren ausgestattet. Diese sorgen dafür, dass der Lift sofort anhält, falls er auf ein Hindernis auffährt.



Platzsparendes Design

Das kompakte Design und die Möglichkeit den Sitz und die Fußplatte hochzuklappen, halten den Treppenraum frei für andere Bewohner oder Gäste. Da die Schiene des Liftes speziell für Ihre Treppe angefertigt wird, kann der Schienenverlauf optimal auf Ihr Treppenhaus abgestimmt werden. Bei Bedarf ist eine elektrische und vollautomatische Klappschiene erhältlich.

Akkus

Wie alle Handicare Treppenlifte arbeitet auch der Handicare 2000 mit Akkus. Das heißt, Sie brauchen keine Angst haben nicht fahren zu können, sollte einmal der Strom ausfallen.





Einfach zu Benutzen

Der Bedienhebel ist denkbar einfach in der Benutzung. Sie halten ihn einfach in die Richtung gedrückt in die Sie fahren möchten und Ihr Lift wird Ihnen gehorchen und sich sanft in Bewegung setzen.



Sicherheitsgurt

Damit Sie sich bei der Fahrt richtig sicher fühlen, ist Ihr Handicare 2000 mit einem leicht zu öffnenden, automatischen Sicherheitsgurt ausgestattet. Wenn Sie möchten, können Sie aber auch eine einfache Klettverschlussvariante als Sicherheitsgurt haben.



Diagnosedisplay

Der Handicare 2000 bietet eine Diagnose-Anzeige, damit Sie den Status Ihres Treppenliftes überwachen können, z. B. ob eine Sicherheitsleiste aktiviert wurde.



Benutzerkomfort

Elektrisch betätigte Klappschiene

In einigen Häusern ist die Eingangstür sehr nahe an der Treppe und es ist möglich, dass die Schiene im Weg ist. In diesen Fällen sollte eine automatische Klappschiene installiert werden. Somit kann die Schiene weg vom Eingangsbereich geklappt werden, wodurch der Türdurchgang nicht behindert wird. Bei Betrieb des Bedienhebels hebt/senkt sich die Klappschiene automatisch.



Elektrisch betätigte Drehvorrichtung

Wenn Sie mit dem Lift am oberen Treppenabsatz ankommen, müssen Sie den Sitz zum Podest drehen, damit Sie sicher auf den Treppenabsatz absteigen können. Der Lift kann aber auch mit einer optionalen, elektrischen Drehvorrichtung ausgestattet werden. Dann wird der Sitz am oberen Ende der Fahrbahn ganz automatisch, durch Gedrückt halten des Bedienhebels gedreht.




Tragkraft

Die Standard-Tragkraft des Handicare 2000 liegt bei 115kg. Mit der Option eines Schwerlastantriebes, kann die Tragkraft auf 137kg erhöht werden.

Elektrisch betätigte Fußstütze

Die Fußstütze und der Sitz Ihres Treppenliftes können hochgeklappt werden. Damit bleibt mehr Platz auf der Treppe für andere Benutzer. Wenn Sie die Option der elektrisch betätigten Fußstütze wählen, dann müssen sie sich zum Hoch- und Herunterklappen der Fußstütze nicht mehr bücken – die Klappfunktion funktioniert ganz automatisch.

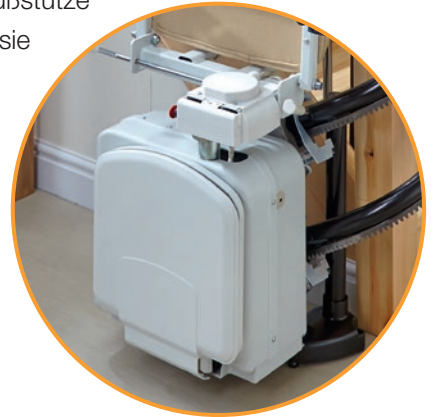

Treppenlift Farben

Der Handicare 2000 wird mit dem Smart-Sitz und dem Simplicity-Sitz angeboten. Der Smart-Sitz bietet Ihnen eine Auswahl von sechs Polsterfarben, während der Simplicity-Sitz in der Farbe Sand wählbar ist. Die Schiene des Handicare 2000 ist in drei Farben erhältlich.

Stehsitz

Für Nutzer mit einem steifen Bein oder eingeschränkter Bewegungsfunktion im Hüftbereich, bietet der Handicare 2000 mit Stehsitz die ideale Lösung.

Mit Hilfe eines Stehsitzes können Sie den Lift auch im Stehen benutzen. Die in diesem Fall etwas kürzere Sitzfläche erleichtert Ihnen das Auf- und Absteigen. Der ausziehbare Sicherheitsgurt sorgt für Ihre Sicherheit. Der Stehsitz bietet Ihnen eine Auswahl von sechs Polsterfarben.




Handicare 2000: auf einen Blick

Sitzoptionen	2000	2000 Simplicity	
Polsterauswahl	✓	-	Eine Auswahl von sechs Polsterfarben ermöglicht eine Abstimmung auf Ihre Einrichtung.
Einziehbarer Sitzgurt	○	-	Dieser einziehbare Gurt kann entweder seitlich oder in der Mitte geschlossen werden.
Sitzgurt mit Klettverschluss	✓	✓	Dieser schwarze Gurt hat an beiden Enden Klettband, damit er sicher in Position gehalten wird.
Stehsitz	○	○	Ideal für Benutzer mit Bewegungsbehinderung an Hüft- oder Kniegelenk.
Version für draußen	○	-	Zur Verwendung draußen gedacht, z.B. zu einer Haustür hinauf.
Fußstützenoptionen	2000	2000 Simplicity	
Manuell	✓	✓	Die Fußstütze wird manuell hoch- und herunter geklappt.
Vom Sitz betätigt	○	○	Klappt die Fußstütze hoch, wenn der Sitz hochgeklappt wird.
Von der Armlehne betätigt	○	-	Die Fußplatte kann im Sitzen mit einem Schalter unter der Armlehne Hoch- oder herunter geklappt werden.
Schienenmerkmale	2000	2000 Simplicity	
Fahren um Ecken und Kurven	✓	✓	Für eine umfangreiche Reihe an Treppen, angefangen von denjenigen, die um eine Ecke oder über mehrere Stockwerke führen bis zu Wendeltreppen.
Mehrere Ladestationen	✓	✓	Fahren Sie den Lift mit der Fernbedienung zu den Ladestationen.
Schiene in beliebiger Farbausführung	○	○	Passen Sie die Kurvenschiene des Treppenlifts Ihrer Einrichtung an.
Min. Schienenüberhang oben	○	○	Zur Verwendung wenn ein Türbereich oben an der Treppe durch die Schiene behindert wird.
Automatische Klappschiene	○	○	Versetzt die Schiene automatisch, während der Treppenlift fährt und hält somit den Türbereich frei.
Gewichtskapazität	2000	2000 Simplicity	
Standardmaximalgewicht	115 kg	115 kg	
Max. mit Heavy-Duty-Kit	137 kg	137 kg	
Normenerfüllung	2000	2000 Simplicity	
EN 81-40: Treppenlifte	✓	✓	

✓ Standardmäßig verfügbar ○ Optional - Nicht verfügbar

Farbauswahl für Polster Smart-Sitz

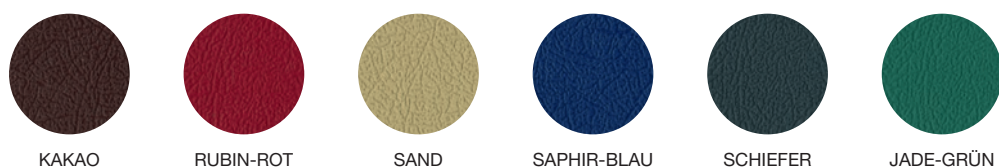

Polsterfarbe Simplicity-Sitz



Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben leicht von den angezeigten Farben abweichen können.

Farbauswahl Schiene



Gegen Aufpreis ist die Schiene auch in einer RAL-Wunschfarbe erhältlich.

Den Alltag erleichtern

Erfahrung

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
Handicare verfügt über mehr als 125 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung und Herstellung von Treppenliften. Somit sind wir einer der ältesten Hersteller von Treppenliften in Europa.

Mit technischer Perfektion und intelligenten Lösungen bietet Handicare nicht nur Treppenlifte mit hohem Komfort, sondern auch individuelle Lifte im Stil und Geschmack des Kunden. Spitzenqualität in jeder Hinsicht macht den Treppenlift von Handicare zu einem wertvollen Element der Unabhängigkeit in Ihrem Zuhause. Viele zufriedene Nutzer erfahren dies täglich.

Qualität

Handicare gewährleistet sowohl hohe Qualität, als auch, Sicherheit, Innovation, Komfort und Design. Als eines der ersten Unternehmen unserer Branche verfügen wir über ein Qualitätssicherungssystem, zertifiziert durch Büro Veritas, das den folgenden Richtlinien und Normen entspricht: ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004.

Außerdem werden unsere Produkte von unabhängigen Prüfstellen auf der ganzen Welt geprüft. Deshalb erfüllen unsere Produkte die höchsten Anforderungen in den Bereichen Qualität und Sicherheit. Wir liefern unsere Treppenlifte mit einer 2-jährigen Garantie.



handicare

Handicare GmbH
Gesellenweg 7
D-32427 Minden
Deutschland

T +49 (0)571 973 398-0
F +49 (0)571 973 398-33
treppenlifte@handicare.de
www.handicare.de

Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben leicht von den angezeigten Farben abweichen können. Alle Informationen wurden nach Treu und Glauben zur Verfügung gestellt, sie stellen jedoch keine Garantie dar. Handicare behält sich das Recht vor, Designs und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern